


高機能集音器 聴楽N10 取扱説明書

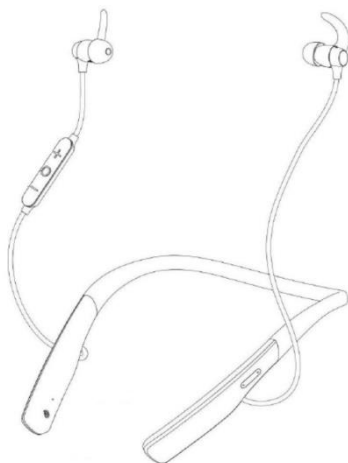

日本国内販売元
株式会社アメディア

もくじ

1. はじめに	3
2. メーカー概要	4
3. 安全上のご注意	5
4. 製品梱包リスト	9
5. 製品の紹介	10
5.1. 製品各部説明と使い方	10
5.2. 電源ランプの説明	16
6. 充電に関する注意事項	16
7. 仕様	17
8. 保証について	18

1. はじめに

このたびはメリー（Merry Electronics）の製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、安全上のご注意に従い、正しくご使用ください。

本製品は先進かつ革命的な個人用集音器です。先進的な技術を利用しており、日常会話のみならず、さまざまな環境でのヒアリング能力の問題を解決することができます。

本製品により日常生活とコミュニケーションの質を改善できることを願っております。

* 集音器は難聴の方の聞こえの改善を目的とした補聴器ではありません。

2. メーカー概要

メリー社は 1975 年の創業以来、オーディオやマイク、電話機や無線イヤホンの企画・開発型の商社として世界中のお客様に提案型のビジネスの提供を行うことで企業価値を高め、事業の発展に取り組んでまいりました。

創業から 30 年に渡り、当社は世界的に企業を取り巻く環境が大きく変化してきている中で、様々な垂直統合を行い、材料加工企業などに投資し、グループ各社と強固なネットワークを構築しました。豊かなコミュニケーションを維持することにより、アジア諸国、台湾、香港、中国に、製造拠点の移管を進める国際企業の多様化するニーズに的確且つ真摯にお応えすることで、お客様に信頼される企業を目指しています。

また、当社は企業としての社会的責任を果たす事は使命であると考え、豊かな地球環境を未来に残すためにも、当社が創業以来培ってきた瞬発力と行動力をもって、事業の成長に挑戦し続けることで社会の発展に貢献してまいります。

3. 安全上のご注意

注意：

- ▲イヤホンは常に清潔に保ってください。
イヤホンを他の人に使用させたり、他の人が使用したものは使わないでください。
- ▲イヤホンを利用し続けると耳に耳垢がたまっていきます。また、イヤホンは抗アレルギー処理されていません。皮膚が赤くなったり、異常を感じた場合は、直ちに医師に相談してください。
- ▲集音器の使用は聴力の補助となるもので、聴力の回復につながるものではありません。

警告！

- ▲大音量は聴力を弱めることがあります。
適切な音量でご使用ください。長時間のご利用も耳に負担をかけますのでご注意ください。
- ▲イヤホンをつける前に、音量は小さくしてください。
突然の大音量は聴力に悪影響を及ぼします。
利用中、音量を上げるときもゆっくりと音量を調整してください。
- ▲イヤホンから音漏れする場合、イヤピースの取り付けをチェックしてください。
イヤピースが耳にぴったり合っていない場合、イヤピースのサイズを変えて調整してください。
- ▲利用中、耳鳴りなどで気分が悪く感じるがありましたら、直ちにご利用を止め、医師に相談してください。

- ▲集音器は小さな部品を使用しており、飲み込みのリスクがあります。幼児やペットの手が届くところに置かないでください。万一、飲み込んだ場合、直ちに医師に相談してください。
- ▲電子機器の利用が制限されている場所ではルールに従い、利用を中止してください。
例：航空機内、病院内など。
- ▲製品を高温・多湿の環境、高圧電力装置の近くでは利用しないでください。
- ▲集音器の電池交換は行えません。初めて使用する時は事前にフル充電してください。
備考：充電時の温度範囲は：+5 から+40℃。
- ▲集音器の充電は付属のケーブルでしてください。
他のケーブルでは故障の原因となります。


クリーニングと保管方法の警告：

- ▲耳垢はイヤホンの穴をふさぎます。使用後は綿棒や乾いた柔らかい布でイヤホンの穴と周囲の耳垢を取ってください。決して化学薬品や洗剤を使用しないでください。機器の故障原因となります。
- ▲使用後は、本体を乾いた柔らかい布で拭いてください。決して化学薬品や洗剤を使用しないでください。機器の故障原因となります。
- ▲水濡れ注意。雨、湿気など各種の液体は電気回路の故障につながります。もしぬれた場合は、電源を切り、完全に乾燥させてください。
その後、購入店にお問い合わせください。
- ▲汚れた場所や埃っぽい場所に保管しないでください。故障の原因となります。


- ▲高温あるいは低温の環境の中で保管しないでください。機器に多大な影響を及ぼし、故障のリスクが高まります。
- ▲分解しないでください。感電のリスクがあります。
- ▲ぬれた手で機器を触らないでください。感電のリスクがあります。
- ▲集音器の電気回路の構造は非常に精密ですので激しい衝撃（例えば落下など）を与えないでください。衝撃は内部の基板と精密な構造を破壊します。

イヤホンに関する注意：

- ▲使用と収納時に、イヤホンケーブルを引っ張ったり、強く曲げる等、負担をかけないでください。断線のリスクがあります

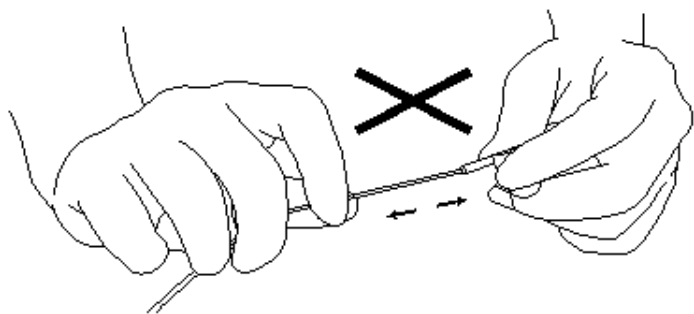

- ▲イヤホンを叩きつけたり、空中でケーブルを回す行為はしないでください。故障の原因となります。

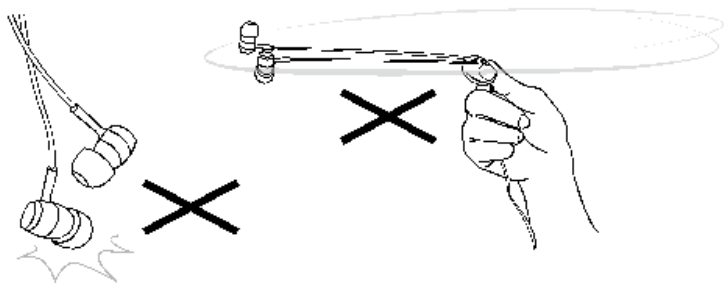

- ▲ケーブルを集音器本体に巻きつけないでください。断線や故障の原因となります。


バッテリーに関する注意：

- ▲高機能集音器 聴楽 N10 は、内蔵の充電式リチウムポリマー電池 (3.7V 200mAh) が採用されています。
お使いのモデルによって異なりますが、フル充電した新しいバッテリーでは最長 20 時間のバッテリー駆動が可能です。バッテリーをフル充電するには約 2.5 時間かかります。
- ▲充電式のバッテリーは充電回数に限りがあります。約 500 回の充電回数を越えると、バッテリーの駆動時間は短くなっていきます。

4. 製品梱包リスト

項目	数量
集音器本体	1
イヤピース×3 サイズ 大、中（本体装着）、小	3
イヤフック×3 サイズ 大、中（本体装着）、小	3
充電ケーブル	1
携帯ケース	1
取扱説明書	1
保証書	1

集音器本体

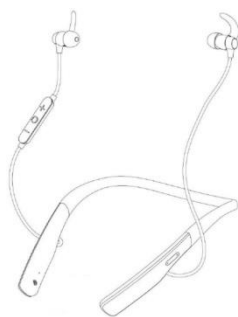

3サイズのイヤフック

左:L 右:R



3サイズのイヤピース

5. 製品の紹介

5.1. 製品の紹介と使い方



1. ヘッドホン	7. ネックバンド
2. サウンドチューブ	8. 左ネックバンド
3. イヤフック	9. マイクの目印
4. イヤピース	10. マイク（左右両側）
5. コントロールボックス	11. 電源ボタン
6. 右ネックバンド	12. LED ランプ

[使い方]

A. 電源を入れる/切る

電源を入れる：オフ状態で【電源ボタン】を短く押すと、デバイスが振動し、LED ランプが緑色に点灯します。

電源を切る：電源オン状態で【電源ボタン】を2秒間押し続けると、デバイスが振動し、LED ランプが黄色に変わり、消えます。



B. イヤピースを交換する

イヤピースを外す：親指、人差し指、中指でイヤピースをつまんで、イヤホンのサウンドチューブからイヤピースを分離します。

イヤピースを組み立てる：適切なサイズのイヤピースを選択し、イヤピースをつまんでヘッドホンのサウンドチューブに挿入します。



より快適に装着できるように、最初に最小サイズのイヤピースを選択することをお勧めします。イヤピースが小さすぎて音漏れが大きすぎるためにハウリングが発生した場合は、ハウリングが発生しなくなるまで大きい方のイヤピースを交換してください。

C. イヤフックを交換する

イヤフックを外す：イヤピースを外した後、イヤホンからイヤフックを外します。



イヤフックを装着：イヤフックをつまんでイヤホンのフロントカバーに取り付けてから、イヤピースを装着します。



より快適に着用するために、最初に最小サイズのイヤフックを選択することをお勧めします。イヤピースが小さすぎて装着が不安定な場合は、安定して装着できるようになるまで大きい方のイヤピースを交換してください。

D. Bluetooth 接続

ペアリングすると、スマートフォンでの通話と音楽を聴くことができます。

電源が入った状態で、+と-ボタンを同時に 4 秒ほど押して、青いライトが速く点滅すると、ペアリングモードに入ります。

携帯の Bluetooth で N10/N30/N50 を探して、ペアリングします。

ペアリングができれば、青いライトは遅く点滅します。通話や音楽を聴かない場合、自動的に集音モードに戻ります。通話や音楽を再生する時、自動的に Bluetooth モードに変更されます。

E. コントロールボックス

コントロールボックスはヘッドセットの右側にあり、3つのボタンがあります。



F. 使用時のボタン操作

1. Bluetooth 接続し音楽を聴いているとき

- ・音量アップ（+）：短く押して音量を上げる。
長押しは次の曲へスキップ。
- ・多機能ボタン：短く押して、音楽の再生/中止
- ・音量ダウン（-）：短く押して音量を下げる。
長押しは前の曲へ戻る。

2. 集音器として使用しているとき

- ・音量アップ（+）：短く押して音量を上げる。
- ・多機能ボタン：長押しはモード切替（静か/騒がしい/好み）
- ・音量ダウン（-）：短く押して音量を下げる。

3. Bluetooth 接続し通話しているとき

- ・音量アップ（+）：短く押して音量を上げる。
- ・多機能ボタン：短く押して、通話の開始/終了。
長押しは電話を無視。
- ・音量ダウン（-）：短く押して音量を下げる。

モード切替

静かモード：音声と環境音が同時に聞こえます。



騒がしいモード：音声を強調して、環境音を下げます。
(ノイズキャンセル) 音声あまり聞こえない時に
このモードをお勧めします。



お好みモード：英語版アプリへの接続が必須です。
アメディアではサポート対象外です。

注意

モードを切り替えるたびに音がなります。
短い「ティーン」という音は静かモード、それ以降は
音が変わる度に騒がしいモード、お好みモードに切り
替わります。

G. 充電

USB ケーブルの小さい方の端を、ヘッドホンの右側のマイクロ USB コネクタに、USB マークが表示されている側を本体の外側に向けて差し込みます。

USB 充電ケーブルのもう一方の端を USB 充電ソケットに差し込むと、約 2.5 時間で充電できます。

5.2. ランプの説明

1. 状態を表示

- ・ 緑点灯：電源オン
- ・ 青点滅：ペアリング中。
- ・ 黄色点灯：電源オフ（振動中、点灯後、消灯）

2. 電池残量を表示（使用中）

- ・ 緑点滅：電池残量が「高」
- ・ 黄色点滅：電池残量が「中」
- ・ 赤点滅：電池残量が「低」

6. 充電に関する注意事項


最初の充電では、フル充電となる、おおよそ 2.5 時間以上、ランプが緑点灯になるまで十分充電する必要があります。

本体を長期間使用しないと、バッテリーが過放電します。過放電により、バッテリーの性能が低下したり、故障したりします。過放電を防ぐには、6 か月ごとに一度フル充電ください。

7. 仕様

- ・ 重さ : 52g
- ・ サイズ : イヤホンケーブル 219±3mm
コントロールボックス 40.3×8.6×7mm
- ・ 最大利得 : 50±5dB (軽度・中等度難聴の方へ)
- ・ 通話用マイク 1つ (コントロールボックス)
- ・ 集音用マイク 4つ (ネックバンド)
- ・ 使用時間 : 集音器使用で約 20 時間、Bluetooth 接続使用で約 5 時間
- ・ 電池容量 : 200mAh
- ・ 充電時間 : 約 2.5 時間。(最初は 2.5 時間以上充電が必要。)
- ・ ヘッドセットを耳から外すと、自動的にスリープ状態になります。外耳道に入ると自動的にスリープ状態から起動します。

環境に関する注意

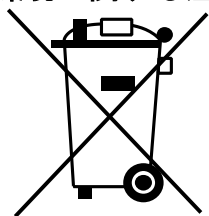

この表示は、本機内蔵バッテリーを一般家庭ゴミに捨てることができないことを表しています。

内蔵バッテリーを処分する時は、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。

免責事項

本取扱説明書の内容及び、本機の仕様、外観は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

8. 保証について

- ▲保証期間は購入日から1年間です。(イヤピースなどの消耗品を含まず)
- ▲型番、製造番号は修理依頼時に必要となります。保証書をご提示ください。
- ▲本取扱説明書に従わなかった不適当な使用と判断した時は、保証は適用されません。

ご不明な点は販売店までご連絡ください。

日本国内代理店
株式会社アメディア
<https://www.amedia.co.jp/>

