

メガネ装着型音声読書器 エンジェルビジョン グラスリーダー



製品ご紹介動画

印刷された文字を撮影し
クリアな音声で読み上げます



製品詳細



電源を入れて原稿を持つだけ
自動で撮影し読み上げ

2年間品質・修理保証
(ただしユーザー登録が必要です)

希望小売価格 **198,000 円** (非課税)

※本製品はカメラで撮影した文字を音声で出力するため、各自治体の日常生活用具給付制度における『視覚障害者用拡大読書器』または『視覚障害者用読書器』として給付を受けられる可能性があります。詳しくは、各自治体の障害福祉窓口にご確認願います。

エンジェルビジョン グラスリーダー 仕様

| | |
|---------------------|--|
| カメラ | 13メガピクセル |
| 重さ | 約 30 g (バッテリー含む) |
| 画像保存 | 不可 |
| 外形寸法 | 横幅 × 高さ × 厚み 約 70 × 26 × 15 mm |
| バッテリー (リチウムイオン) | 連続使用時間： 約 90 分 充電時間： 約 60 分 |
| 電源 | 出力：5V/2A |
| Bluetooth | バージョン 4.1 以上の 機器が接続可能 |
| Bluetooth 接続可能距離 | 最大 5 m |
| 2年間品質・修理保証 | |
| 内容 | ユーザー登録をして いただいた場合、 1年間から2年間に 延長します。 ※落下、水濡れ、誤使用、 火災、天災などによる 故障や付属品は保証の 対象ではありません。 |

別売：左耳用バックル

左耳用バックル 990 円（税込）
※標準付属ではありません。

メガネに装着できる音声読書器

お使いのメガネフレームに取り付け、撮影した文章を読み上げる AI 音声読書器です。重さ約 30g ネット接続が不要で、外出先でも使用できます。



電源 ON→撮影・読み上げまで全自動

電源を入れると自動的に文章識別モードに入り、読み上げたい原稿の位置がずれていると、位置修正を行うための音声ガイドを行います。撮影に適した位置まで原稿を持ってくると、自動的に撮影し、読み上げを開始します。

シンプルな操作

音量アップ / ダウンや手動での撮影、各種設定は本体をタッチ / スワイプするシンプルな操作が特長です。また、設定メニュー内では読み上げる音声（男性または女性）や読み上げスピードの調節など各種操作を音声ガイドでサポートします。



Bluetooth 接続対応

Bluetooth イヤホンに接続でき、周囲に気兼ねなく使用できます。また、Bluetooth スピーカーに接続して音量を大きくすることもできます。

※Bluetooth 製品は付属していません。

※Bluetooth は ON/OFF のたびに機器の接続設定が必要です。

※システムギアビジョンは世界中から優れた視覚支援機器を厳選し、徹底した品質管理を行い、安心のアフターサービスとともにご提供いたします。

輸入・販売元



SystemGear 株式会社システムギアビジョン
Always the next news

〒665-0051 兵庫県宝塚市高司 1-6-11

TEL : 0797-74-2206 FAX : 0797-73-8894

東京 : 03-6845-3377 名古屋 : 052-857-6677

HP : www.sgv.co.jp E-mail:sgv-info@systemgear.com

製造元：NextVPU（生産国：中国）

■お問い合わせ