

## 1. はじめに

携帯型電子ルーペのミニマックス（以下「本製品」）をお選びいただきありがとうございます。

読んだり、書いたり、地図、メニューまたはラベルなどを見るために、本製品をご使用ください。

本製品の使用にあたって、ご質問、ご感想などがありましたら、販売店、またはアメディアまでご連絡ください。

本取扱説明書は、本製品の特徴と操作について説明しております。

ご使用前に、必ず本取扱説明書をお読みください。

また、いつでも参照するために、本取扱説明書をお手元に保管しておいてください。

## 2. 安全上のご注意

※ここに示した注意事項は安全に関する内容を記載しています。お使いになる前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

●本製品を急激な極端な気温や湿度の変化がある環境では使用しないでください。

●本製品をストーブ・パネルヒーターの近く、または日光の直接あたる場所に置かないでください。故障の原因になるおそれがあります。

●本製品は大切にしてください。乱暴な使用は、内部部品などの故障の原因になります。

●本製品を分解しないでください。修理が必要な場合には、お近くの販売店またはアメディアまでご連絡ください。

●どの箇所も開けないでください。開けた場合には、保証が無効になります。

●洗剤または研磨剤は、本製品を故障させるので、使用しないでください。またカメラのレンズに直接触らないようにしてください。

●同梱されている AC アダプタをご使用ください。

●本製品を強くたたいたり振動させたり抑えたり落としたりしないでください。

●本製品を氷点下 5 度以下や 50 度以上または多湿な場所での保管、使用は避けてください。

●本取扱説明書に従わない本製品の使用の場合には、保証は無効になります。

## 3. パッケージの内容


本製品パッケージには次のものが入っています。

- ・ 本製品
- ・ 取扱説明書
- ・ アダプター（四種類：USA、EU、AUS、UK）
- ・ 電源ケーブル
- ・ USB ケーブル：本製品を PC と接続して充電する際に使うケーブル
- ・ リチウム電池（挿入済み）
- ・ クリーニングクロス
- ・ 保護ケース
- ・ ハンドストラップ
- ・ ネックストラップ

万が一パッケージに入っていないものがあれば、販売店または、アメディアまでご連絡ください。

## 4. 各部の名称

本体上面

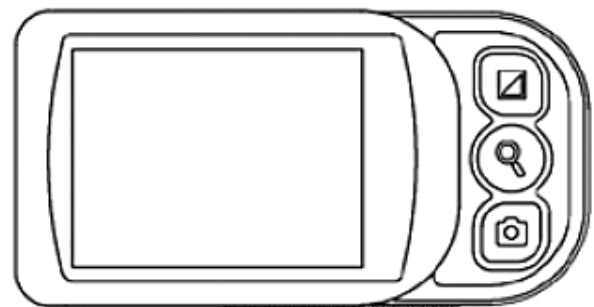

・ 表示モードボタン  
表示色を切り替える時に使用します。




・ 倍率切り替えボタン  
倍率を切り替える時に使用します。




・ イメージボタン  
表示中の画像を静止したい時に使用します。

右側面

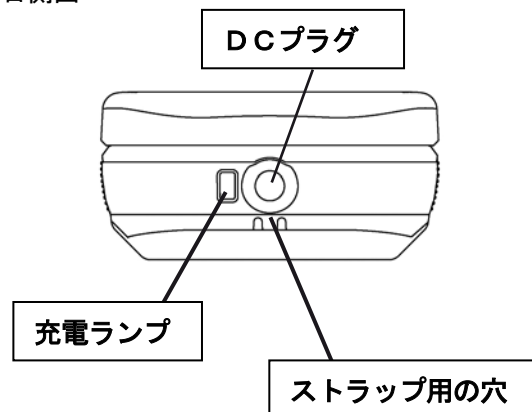

## 左側面

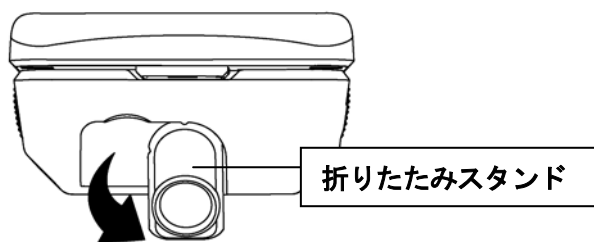

- ・ 筆記する時に折りたたみスタンドを立てて使  
います。

## 5. 準備


DCプラグに電源ケーブルの片方を接続し、もう片方をコンセントに接続して充電します。充電中は、充電ランプが点灯します。充電が終わると、消灯します。

充電時間はバッテリーが空の状態から、最大で約 5 時間です。連続使用で約 3 時間動作します。

## 6. 操作

### ①電源 ON/OFF

本製品のモニタ部分をスライドさせると電源が入ります。逆にモニタ部分を戻すと電源が切れます。

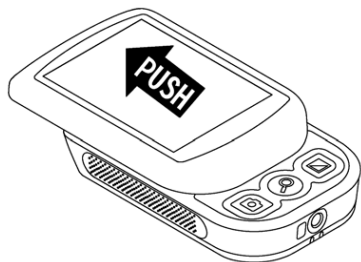

### ②折りたたみスタンド

筆記時に折りたたみスタンドを立ててください。原稿とカメラとの間に距離ができますので、筆記がしやすくなります。

### ③表示モードの切替

表示モードボタンを押すごとに表示色が切り替わります。以下の 6 種類の表示モードから見やすい表示に切り替えてください。

- ・ フルカラーモード
- ・ 黒の背景に緑文字
- ・ 白の背景に黒文字
- ・ 黒の背景に黄色文字
- ・ 黒の背景に白文字
- ・ 青の背景に黄色文字

### ④倍率の切替

倍率切り替えボタンを押すと約 3 倍、4.5 倍、6.5 倍と切り替わります。スタンドを立てた時は約 1.8 倍、2.7 倍、3.8 倍です。

### ⑤イメージボタン

イメージボタンを押すと画面が静止します。再度、イメージボタンを押すと拡大表示に戻ります。

### ⑥LED ライト

通常、LED ライトは点灯していますが、表示モードボタンを約 3 秒間押し続けると LED ライトが消灯します。光を反射するパッケージなどを見るときに

LED ライトを消灯すると見やすくなります。再度、LED ライトを点灯させたいときは、表示モードボタンを押します。

### ⑦自動電源 OFF

約 5 分間、操作しないと自動的に電源が切れます。再度、電源を入れるには表示モード、倍率切り替え、イメージボタンのいずれかを押しすと電源が入ります。

## 7. 仕様

拡大率	約 3、4.5、6.5 倍 (スタンド使用時：約 1.8、 2.7、3.8 倍)
色表示	カラー、白黒、白黒反転、黒 緑、青黄、黒黄
リチウムイオン バッテリー量	1800 mAh
連続使用時間	約 3 時間
充電時間	約 5 時間
画面サイズ	2.8 インチ液晶 TFT
本体サイズ	90×60×30mm (幅×奥行×高さ)
重量	142g
使用環境条件	気温：0 度～40 度 湿度：70%以下 (ただし結 露のないこと)

## ミニマックス取扱説明書

2012 年 12 月版

株式会社アメディア

〒176-0011 東京都練馬区豊玉上 1-15-6

第 10 秋山ビル 1 階

電話：03-6915-8597 FAX：03-3994-7177

<http://www.amedia.co.jp/>

# ミニマックス

## (miniMAX)

### 取扱説明書