

よむべえシリーズ 操作パネル早見表

音声読書器モード

ひとつのキーを押して出来る操作

TAB 取り消し	/ しおり登録・削除 (×2)	* 標準の状態 (×2)	BS
7 前のしおり (×2)	8 前の文	9 ページの先頭(×1) 前のページ(×2)	- 速度アップ (最速の次は最遅)
4 前の文節	5 停止・再開	6 次の文節	+ 現在位置
1 次のしおり (×2)	2 次の文	3 次のページ	Enter 読み取り (×2)
0 書式切換え	00	. モード切換え (決定はEnterキー)	

(×2) は2度押しです。

詳しい使い方は、取扱説明書をご覧ください。

左上 (Tabキー) との組み合わせで出来る操作

右上 (BSキー) との組み合わせで出来る操作

TAB	/ 文書名をつける (×2) 読み取り翻訳 (×2)	* 設定変更 (×2) このページを 翻訳 (×2)	BS
7 前の数字列/ 文字列を検索 (×2) (文字列を選択後)	8 前の段落 上の領域	9 前の文書 (×2) ページ削除 (×2)	- 速度ダウン 読み上げ音量 を上げる
4 前の1文字 左の領域	5 文字選択 ページの引越 (×2)	6 次の1文字 右の領域	+ 文書情報 ページ補正方式 の切換え
1 次の数字列/ 文字列を検索 (×2) (文字列を選択後)	2 次の段落 下の領域	3 次の文書 (×2) ごみ箱の確認 (×2)	Enter クラウド認識 (×2) 通帳読み取り (×2)
0 表示色切換え	00	. 拡張メニュー (×2) AIメニュー (×2)	