

1. はじめに

携帯型電子ルーペズームポケット（以下「本製品」）をお選びいただきありがとうございます。読んだり、書いたり、地図、メニューまたはラベルなどを見るために、どうぞ、本製品をご使用ください。

本製品の使用にあたって、ご質問、ご感想などがありましたら、販売店、またはアメディアまでご連絡ください。

本取扱説明書は、本製品の特徴と操作について説明しております。

ご使用前に、必ず本取扱説明書をお読みください。

また、いつでも参照するために、本取扱説明書をお手元に保管しておいてください。

2. 安全上のご注意

※ここに示した注意事項は安全に関する内容を記載しています。

お使いになる前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

●本製品を急激な極端な気温や湿度の変化がある環境では使用しないでください。

●本製品をストーブ・パネルヒーターの近く、または日光の直接あたる場所に置かないでください。故障の原因になるおそれがあります。

●本製品は大切に请使用ください。

乱暴な使用は、内部部品などの故障の原因になります。

●本製品を分解しないでください。修理が必要な場合には、お近くの販売店またはアメディアまでご連絡ください。

●どの箇所も開けないでください。開けた場合には、保証が無効になります。

●洗浄剤または研磨剤は、本製品を故障させるので、使用しないでください。またカメラのレンズに直接触らないようにしてください。

●同梱されている AC アダプタを请使用ください。

●本製品を強くたたいたり振動させたり抑えたり落としたりしないでください。

●本製品を氷点下 1 度以下や 41 度以上または多湿な場所での保管、使用は避けてください。

●本取扱説明書に従わない本製品の使用の場合には、保証は無効になります。

3. パッケージの内容

本製品パッケージには次のものが入っています。

- 1) ズームポケット本体
- 2) ビデオケーブル
- 3) リチウムイオン充電電池
- 4) 保護用ケース
- 5) 電源ケーブル・アダプタ
- 6) ストラップ
- 7) クロス
- 8) 保証書兼取扱説明書（本書）

万が一パッケージに入っていないものがあれば、販売店または、アメディアまでご連絡ください。

4. 各部の名称



5. 準備

電源アダプタジャックに電源ケーブルの片方を接続し、もう片方をコンセントに接続して充電します。充電中は、LED が赤に点灯します。充電が終わると、消灯します。充電時間はバッテリーが空の状態から、最大で約3時間です。連続使用で約2時間動作します。

バッテリーカバーを外すと充電電池の交換ができます。

6. 操作

①電源 ON/OFF

本製品の電源を入れるには、電源ボタンを約3秒間押し続けてください。

電源を切る時も、同じ操作です。

②表示モードの切替

モードボタンを押すと表示モードが切り替わります。7種類の表示モードから見やすい表示に切り替えてください。

③倍率の切替

ズームイン、ズームアウトボタンを押すと、表示倍率を変更できます。倍率は約2倍から16倍までの無段階で調節できます。

④静止画像

ロックボタンを押すと画面が静止します。再度、イメージボタンを押すと拡大表示に戻ります。静止画像を撮った後、倍率の変更や表示モードを切り替えることができます。

⑤画面明るさ切替

電源ボタンを短く押すと画面の明るさが変更できます。

⑥操作音のオンオフ

ロックボタンを長く押すことにより、切替できます。

⑦背面 LED ライトの明るさ調節

モードボタンを押しながらズームインを押すと明るく、ズームアウトボタンを押すと暗くできます。

⑧自動電源 OFF

約2分間、操作しないと自動的に電源が切れます。

⑨AV 端子に付属ケーブルにてテレビ（別売）と接続すると、大画面にて表示されます。

7. 仕様

拡大率	約2～16倍
色表示	7種類
静止画像	可能（色変更、倍率変更も可能）
バッテリー	リチウムイオン、1500mAh
連続使用時間	約2時間
充電時間	約3時間
画面サイズ	3.5インチ液晶
本体サイズ	幅115×奥行78×高さ25mm
重量	150g
ACアダプタ入力	5V 1A
使用環境条件	気温：0度～40度 湿度：70%以下（結露のないこと）

8. 保証について

保証期間は1年間です。故障の際は、お求めになった販売店もしくは株式会社アメディアまでご連絡ください。

保証書

- ・製品名 ズームポケット
- ・保証期間 年 月 日から1年間
- ・ご住所
- ・お名前
- ・電話番号
- ・販売店名

ズームポケット取扱説明書

2014年12月版

株式会社アメディア

〒176-0011 東京都練馬区豊玉上1-15-6

第10秋山ビル1階

電話：03-6915-8597 FAX：03-3994-7177

<http://www.amedia.co.jp/>

ズームポケット

取扱説明書